

TEST RAPIDO CLAMIDIA

• **29117 TEST RAPIDO CLAMIDIA** - conf. da 20 test
Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo al medico una diagnosi immediata. Test ad alta sensibilità e specificità. Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi cervicali femminili, gocciolatori, pipette e manuale utente. Per uso professionale.

Tampone campione Uomo / Donna
- Aggiungere il reagente A e B al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

Campione urine Uomo
- Aggiungere il reagente B e A al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

10 min. Positive Negative Invalid

Chlamydia

CE 0197

TEST RAPIDO SIFILIDE

• **29118 TEST SIFILIDE** - conf. da 40 test
Utilizzo rapido e semplice: test su sangue intero, risultati in soli 10 minuti adatto per l'impiego in studi medici. Preciso: sensibilità 99,7% e specificità 99,6%, antigeni ricombinanti, rileva gli anticorpi IgG e IgM e gli antigeni treponemali. Procedura a 2 fasi e interpretazione visuale. Per uso professionale.



KIT TEST VAGINITE

Il test comprende:
1 test +
tampone vaginale +
campione in singola
confezione
(soluzione di contrasto)
+ manuale in italiano
ed inglese

1	2a	2b	3	4	5	6
pH	Gardnerella	Nitrite	Blood	Protein	Leukocytes	
1	2	3	4	5	6	

Vaginitis Test Kit

PATIENT NAME _____

CE

• **29111 KIT TEST VAGINITE** - conf. da 1 test
Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono giorni, riducendo a un decimo i costi. Il manuale d'uso fornisce una guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, Batteri responsabili di gravi vaginiti. Per uso professionale.

TEST CANDIDA

• **29105 TEST CANDIDA** - conf. da 20 test
Test rapido immunocromatografico, grazie alla presenza di anticorpi specifici è in grado di individuare la presenza di Candida in soli 10/20 minuti. Il test è stato comprovato da studi indipendenti e presenta una sensibilità superiore al 98% e specificità superiore al 94% rispetto ai metodi di riferimento. La riproducibilità si pone al livello più alto dei test rapidi. La Candida colpisce il 50% delle donne almeno una volta nella vita ed i sintomi possono essere scambiati per quelli della vaginite batterica o altre vaginiti, l'uso di questo test coadiuvato dal test sul pH vaginale (vedere codice 29110) consente la discriminazione tra le due patologie. Per uso professionale.

• **29106 CANDIDA AUTOCONTROLLO** - conf. da 1 test
Come il cod. 29105 ma in confezione singola per autocontrollo.

TEST STREP-B

• **29123 TEST STREP-B** - conf. da 20 test
Nuovo test rapido per l'identificazione dello streptococco di tipo B all'interno dei fluidi vaginali. Lo streptococco di gruppo B (GBS) o lo streptococco agalactia rappresentano una delle infezioni più comuni nei neonati. Mentre i metodi tradizionali richiedono dalle 24 alle 48 h di incubazione, i test diagnostici rapidi risultano essere affidabili e una valida alternativa per la diagnosi. Questo test si caratterizza per un'elevata sensibilità specifica di $1,0 \times 10^5$ microrganismi. Per uso professionale.

TEST PH VAGINALE

Il kit contiene
10 tamponi in cotone
+ 10 strisce reagenti in
singola scatola di cartone
con manuale d'uso
(italiano + inglese).

TEST pH VAGINALE striscia - pH VAGINAL TEST strip

Read test result while still moist
Leggere i risultati del test quando la striscia è ancora umida

IVD PER USO PROFESSIONALE
FOR PROFESSIONAL USE
Ameritek Inc. - Everett, WA 98203, USA
CEPHEID Partner BV - The Netherlands

MADE IN EXTRA UE

CE

• **29110 TEST PH VAGINALE** - conf. da 10 test
Test veloce per determinare il Ph vaginale. Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il Ph è entro i parametri fisiologici (< 4,5). Un aumento del livello di Ph può indicare un cambiamento nell'area vaginale. Il test è ideale in caso di gravidanza e diabete. Per uso professionale.

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO - LATEX FREE



Confezionati singolarmente in una scatola di cartone con istruzioni in italiano e inglese

Codice GIMA	PESSARIO IN GOMMA - AUTOCLAVABILE
29882	Pessario in gomma Ø 55 mm
29963	Pessario in gomma Ø 60 mm
29964	Pessario in gomma Ø 65 mm
29965	Pessario in gomma Ø 70 mm
29966	Pessario in gomma Ø 75 mm
29967	Pessario in gomma Ø 80 mm
29968	Pessario in gomma Ø 85 mm
29969	Pessario in gomma Ø 90 mm
29884	Pessario in gomma Ø 95 mm
	PESSARIO IN SILICONE - AUTOCLAVABILE
29893	Pessario in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario in silicone Ø 80 mm