

## URINALYSIS STRIPS

- STRISCE URINA IN FLACONE  
10 parametri
- VISUAL URINALYSIS STRIPS  
10 parameters
- BANDETTES VISUELLES  
URINALYSIS - 10 paramètres
- TIRAS VISUALES URINALYSIS  
10 parámetros



Solo per uso  
professionale  
For professional use only  
Pour usage professionnel  
uniquement  
Uso profesional exclusivo

**100** STRISCE • STRIPS  
BANDETTES • TIRAS

**GIMA**

www.gimaitaly.com

### IT - IMPORTANTE

- Tenere lontano da luce e umidità
- Riposizionare immediatamente il cappuccio dopo aver estratto le strisce.
- Non rimuovere i desiccanti.
- Non toccare le aree di test delle strisce reagenti.
- Utilizzare entro la data di scadenza.
- Leggere con attenzione l'insero prima dell'uso.

### GB - IMPORTANT

- Keep away from light and moisture.
- Promptly replace cap after taking out strips.
- Do not remove desiccants.
- Do not touch test areas of reagent strips.
- Use it with in the expiration date.
- Read Insert carefully before use.

### FR - IMPORTANT

- Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Remplacer rapidement le capuchon après avoir sorti les bandelettes.
- Ne pas retirer les sachets déshydratants.
- Ne pas toucher les zones de test des bandelettes réactives.
- Les utiliser avant la date d'expiration.
- Lire attentivement l'insert avant utilisation.

### ES - IMPORTANTE

- Mantener alejado de la luz y la humedad.
- Tapar e inmediatamente de nuevo después de haber sacado las tiras.
- No eliminar los desecantes.
- No tocar las áreas de test de las tiras reactivas.
- Usar antes de la fecha de caducidad.
- Leer atentamente el prospecto antes del uso.

100 (1" x 3/4" x 1/8") STRIPS  
02/00 - 1 - WH 095605



### INGREDIENTI / INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES

Leucociti / Leukocytes / Leucocytes / Leucocitos  
pyr. of amino acid ester  
diazonium salt 4.3%w/w  
0.4%w/w

Nitriti / Nitrite / Nitrites / Nitrito  
p-arsanilic acid  
N-(1-Naphthyl)diazolamine 1.3%w/w  
0.9%w/w

Urobilinogeni / Urobilinogen /  
Urobilinogène / Urobilinógeno  
p-diethylamino benzaldehyde 0.2%w/w

Proteine / Protein / Protéines / Proteína  
tetrazolophenyl blue 0.1 %w/w

PH  
bromoresol green  
bromthymol blue 3.3%w/w  
35.0%w/w

Pressione / Blood / Sang / Atterial  
diisopropylbenzene dihydroperoxide 26.0%w/w  
tetramethylbenzidine 1.5%w/w

Gravità specifica / Specific Gravity /  
Densité spécifique / Gravedad específica  
bromthymol blue 4.8%w/w  
poly (methyl vinyl ether co maleic anhydride) 90.2%w/w

Chetoni / Ketone / Corps cétoniques / Cetona  
sodium nitroprusside 5.2%w/w

Bilirubina / Bilirubin / Bilirubine / Bilirubina  
2,4-dichloroaniline diazonium salt 0.6%w/w

Glucose / Glucose / Glucose / Glucosa  
glucose oxidase (mucobal, 23U) 1.7%w/w  
peroxidase (horseradish, 20U) 0.2%w/w  
potassium iodide 0.1%w/w

Capacità interferenze anti-VC  
Leucociti - Nitriti - Urobilinogeni - Proteine  
pH - Pressione - Gravità specifica - Chetoni  
Bilirubina - Glucosio

Anti-VC Interference ability  
Leucocytes - Nitrite - Urobilinogen - Protein  
pH - Blood - Specific Gravity - Ketone - Bilirubin  
Glucose

Capacité anti-interférences VC  
Leucocytes - Nitrites - Urobilinogène - Protéines  
pH - Sang - Densité spécifique - Corps cétoniques  
Bilirubine - Glucose

Capacidad interferencia anti-VC  
Leucocitos - Nitrito - Urobilinógeno - Proteína  
pH - Arterial - Gravedad específica - Cetona  
Bilirubina - Glucosa

Per organizzazioni mediche che testano  
e analizzano i campioni di urina  
For medical organization testing  
and analyzing the urine specimen  
Pour les tests de l'organisation médicale  
et l'analyse de l'échantillon d'urine  
Para pruebas análisis de muestras  
de orina en organización médica

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.  
3787A, East Yangguang Avenue, Dipu Street  
Anji 311332, Huzhou, Zhejiang, China  
Made in China

Shanghai International  
Holding Corp GmbH (Europe)  
Bilfstrasse 89, 20537, Hamburg, Germany

Importato da / Imported by /  
Importé par / Importa do por:  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20160 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

REF URS-10T (GIMA 24076)

LOT



CE

IVD

ISO 13485