



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI  
BASIC PEDAL EXERCISER  
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE  
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO  
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO  
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN  
ROTOR DO ĆWICZEŃ  
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII  
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP  
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

**REF** TD001P-2 (Gima 43150)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:  
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD  
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,  
Yongkang, Zhejiang, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por  
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)





1



2



3

- ITALIANO**
1. Collegare i tubi su ciascun lato, utilizzando le viti come sopra descritto.
  2. Fissare il resistore al telaio principale utilizzando le viti.
  3. Allineare la manopola di regolazione al centro del foro e girarla nel resistore per regolare l'intensità di esercizio.

**Nota:** Posizionare il prodotto su un pavimento piano. È possibile usarlo con le mani o con i piedi girando in senso orario o antiorario per fare esercizio.

**Avvertenza:** Non salire direttamente in piedi sul prodotto. Sedersi se si usano i piedi.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.