

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

nl GEBRUIKSAANWIJZING

CE 0086

Manufacturer:
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com **smiths medical**

CCN.004/008/015 REV.001 06/12

nl **Nederlands**

Let op

Niet opnieuw gebruiken

Niet opnieuw steriliseren

Catalogusnummer

Batchcode

Fabricagedatum

Te gebruiken voor

Fabrikant

Bevat geen natuurlijke rubberlatex

Aantal

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Onderdelen vloeistofpad niet-pyrogeen

Temperatuurlimiet

Deze kant boven

Breekbaar, voorzichtig behandelen

Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is

Droog houden

Niet blootstellen aan zonlicht

! (Warning)

⌘ (No reuse)

REF (Reference)

LOT (Batch)

⏰ (Date)

🏭 (Manufacturer)

🚫 (No latex)

📦 (Packaging)

STERILE EO

🔪 (Surgical)

↑↑ (Direction)

🍷 (Glass)

🚫 (No use)

☂️ (Sun)

☀️ (Sun)

Nederlands Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (recht)


GEBRUIKSAANWIJZING

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende Jelco®-producten:
7130 tot 7138 & 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G tot 24 G
7260 tot 7269 & 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G tot 24 G

Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor een veilig gebruik van het product. Lees de gehele inhoud van deze gebruiksaanwijzing door, met inbegrip van de waarschuwingen, aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen, alvorens dit product in gebruik te nemen. Wanneer de waarschuwingen, aandachtspunten, voorzorgsmaatregelen en instructies niet goed in acht worden genomen, kan dat tot overlijden of ernstig letsel van de patiënt en/of de zorgverlener leiden.

OPMERKING: ZORG DAT DEZE BIJSLUITER OP ALLE BEWAARLOCATIES VAN HET PRODUCT VOORHANDEN IS.

1. BESCHRIJVING:
Elke Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ bestaat uit een introductie-naald en een geïntegreerde naaldtipbeschermer. De voornaamste onderdelen zijn (1) naaldpunt, (2) naald, (3) katheter, (4) katheterhub, (5) tipbeschermer, (6) flashbackkamer, (7) flashplug, (8) huls, (9) behuizing van naaldnaaf.

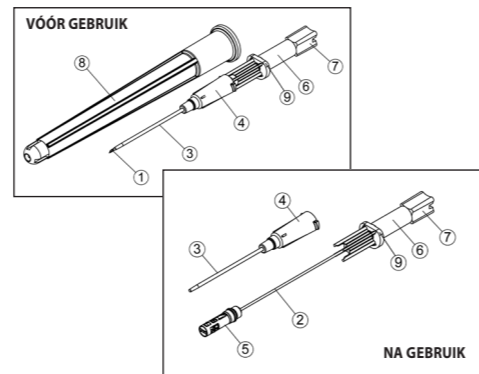

OVERZICHT KATHETERMATEN EN KLEURVERWIJZINGEN

Diameter	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Kleur	Oranje	Grijs	Groen	Roze	Blauw	Geel

Dit hulpmiddel is alleen bestemd voor eenmalig gebruik. Het wordt steriel en pyrogeenvrij geleverd. De materialen die voor het fabriceren van deze

radiopake intraveneuze katheter zijn gebruikt, bevatten geen latex en geen PVC of bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP).

- INDICATIES:**
 - Een deugdelijk geplaatste Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ verschaft toegang tot een vene of arterie voor bloedmonsterafname, bloeddrukbevestiging of voor het toedienen van vloeistoffen.
 - De tipbeschermer sluit de naald in tijdens het terugtrekken. Hierdoor vermindert het risico op prikaccidenten.
 - Deze katheters kunnen voor alle patiëntenpopulaties worden gebruikt, met inachtneming van het postuur van de patiënt, diens geschiktheid voor de te infunderen vloeistof en de duur van de therapie.
 - Katheters met een diameter van 14 tot 24 G kunnen worden gebruikt in combinatie met hoge druk injectors met een drukwaarde tot 300 psi.
- CONTRA-INDICATIES:**

Er zijn geen contra-indicaties bekend.
- WAARSCHUWINGEN:**
 - Om een correct gebruik te waarborgen MOETEN GEBRUIKERS GESCHOOLD ZIJN IN HET UITVOEREN VAN VENAPUNCTIES en moet de gebruiksaanwijzing worden nageleefd. Wanneer deze instructies niet goed in acht worden genomen, kan dat tot overlijden of ernstig letsel van de patiënt en/of de zorgverlener leiden.
 - Vermijd het risico van embolie o.a. door:
 - NIET IN DE KATHETER TE SNIJDEN/KNIPPEN en geen scherpe instrumenten gebruiken in de buurt van de katheter;
 - de introductie-naald nooit opnieuw in de katheter in te brengen, want de katheter kan dan afbreken.
 - Vermijd prikaccidenten o.a. door:
 - DE NAALD NIET TE BUIJGEN tijdens het inbrengen, opvoeren of verwijderen van de katheterset;
 - Bij een mislukte venapunctie dient het veiligheidsmechanisme geactiveerd te worden. Naald en katheter moeten beiden worden weggegooid.
 - In het onwaarschijnlijke geval dat het hulpmiddel niet blokkeert, dienen de scherpe onderdelen onmiddellijk in een goedgekeurde naaldcontainer te worden afgevoerd.
 - Hierdoor wordt de activatie van de tipbeschermer verhinderd.
 - Manipuleer voor of na gebruik niet met de tipbeschermer.
- LET OP:**
 - Het product is steriel, gifvrij en pyrogeenvrij, tenzij de verpakking geopend, nat of beschadigd is. Gebruik het product niet als de verpakking open, nat of beschadigd is.
 - Voordat met hoge druk injectors wordt gewerkt, moet de doorgankelijkheid van de katheter worden bevestigd. Bij toepassing van een injectordruk hoger dan 300 psi kan het hulpmiddel gaan lekken en/of anderszins schade oplopen. Laat de katheter niet knikken of anderszins belemmerd worden wanneer van een hoge druk injector gebruik wordt gemaakt. Verzeker u ervan dat de hoge druk injector goed is gekalibreerd en automatisch afslaat bij overschrijding van een druk van 300 psi.
- VOORZORGSMAATREGELEN:**
 - Dit hulpmiddel heeft als doel het risico van prikaccidenten te verminderen. Aanvullend op deze gebruiksaanwijzing wordt zorgverleners geadviseerd, bij het aanleggen, in werking houden en afvoeren van intraveneuze katheters de aanbevelingen na te leven zoals verwoord in de normen van CDC en OSHA (VS), of plaatselijke equivalenten daarvan, met betrekking tot via bloed overdraagbare pathogenen, ter vermindering van het risico van

- ongewenste blootstelling aan bloed.
- Neem de in uw zorginstelling geldende beleidlijnen en procedures voor het inbrengen, in werking houden en verwijderen van katheters in acht.
- De katheter is korter dan de introductie-naald. Daardoor kan reflux van bloed optreden voordat de kathetertip geheel tot in het bloedvat is doorgedrongen. Voer zo nodig de katheter en de naald gezamenlijk enigszins op, om volledige toegang van de katheter tot het lumen van het bloedvat te waarborgen. Breng de naald in een positie evenwijdig aan de huid, om te voorkomen dat de naald per ongeluk door de achterwand van het bloedvat wordt gestoken.
- Zorg dat de aansluitingen tussen infuuslijn en hub goed vast zitten, zodat lekkage wordt voorkomen.
- Zorg voor een stabiele positie van de katheter ten opzichte van de patiënt. Ongeveerlijke stabilisatie kan de vaattoegang in gevaar brengen.
- GEBRUIKSAANWIJZING:**
In verband met de kans op blootstelling aan via bloed overdraagbare pathogenen moeten bij plaatsing, gebruik en verwijdering van intraveneuze katheter de standaard voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.
 - Kies en prepareer de aanprikplaats volgens het beleid van uw zorginstelling. Breng een toumiquet aan.
 - Verwijder de huls met een loodrechte buitenwaartse beweging en inspecteer het hulpmiddel. Verzeker u ervan dat de snap-cap is gesloten en dat de katheterhub goed is geplaatst. Controleer of het naaldpunt naar boven is gericht.
 - Houd het hulpmiddel vast bij de transparante cilindervormige flashbackkamer. Controleer of het vlakke gedeelte van de behuizing van de naaldnaaf en het naaldpunt naar boven zijn gericht.
 - Veranker het bloedvat met lichte tractie van de huid en breng de naald onder de juiste hoek in de huid en het bloedvat in.
 - Toegang tot het bloedvat wordt bevestigd door reflux van bloed in de flashbackkamer.
 - Verklein de inbrenghoek en duw het hulpmiddel enigszins vooruit om zeker te stellen dat de katheter het bloedvat binnengaat.
 - Verwijder de toumiquet.
 - Voordat de naald wordt verwijderd, moet distaal van de kathetertip met de vinger druk op het bloedvat worden uitgeoefend. Vervolgens wordt de naald recht achteruit teruggetrokken terwijl de katheterhub op zijn plaats wordt gehouden. De tipbeschermer schuift automatisch over de naaldtip. Opmerking: bij het verwijderen van de beschermde naald uit de katheterhub is een lichte weerstand voelbaar.
 - Opmerking: breng de tipbeschermer na verwijdering niet opnieuw in de katheterhub in.**
 - Sluit de lijn voor intraveneuze toediening aan en verbind de aanprikplaats volgens het in uw zorginstelling geldende beleid.
 - Gooi het hulpmiddel onmiddellijk weg in een prik- en lekbestendige naaldcontainer.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, de logo's Jelco en Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkbureau en in bepaalde andere landen gedeponeerd is. Alle andere genoemde namen en merken zijn de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de respectievelijke eigenaren. Er is geen verband tussen Smiths Medical en Intuitive Surgical.
© 2

nl
Voor eenmalig gebruik.
Niet opnieuw gebruiken: Voor een beoogde werking moeten medische hulpmiddelen over specifieke materiaaleigenschappen beschikken. Deze eigenschappen zijn na verificatie alleen voor eenmalig gebruik geschikt verklaard. Probeer niet het hulpmiddel opnieuw te bewerken met hergebruik als doel. Zulke pogingen kunnen een ongunstige invloed op de integriteit van het hulpmiddel hebben of kunnen een verslechterde werking van het hulpmiddel veroorzaken. Steriel tenzij de doos geopend of beschadigd is. Vernietigen na eenmalig gebruik. Mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.