

ÉCRASE-COMPRIMÉS

- **25872 ÉCRASE-COMPRIMÉS HOSPITALIER SILENT KNIGHT**
 - **25873 SACHETS POUR SILENT KNIGHT - 1 000 sachets (20 boîtes de 50)**
- Écrase-comprimés professionnel et silencieux pour hôpitaux, il réduit les comprimés en poudre fine au bout de quelques secondes, facilement et sans effort. Les sachets évitent la contamination croisée et la perte de médicament. Silent Knight est livré avec 50 sachets.



Étape 1: introduire les comprimés dans le sachet de l'écrase-comprimés. Soulever la poignée et déposer le sachet entre les plaques de l'écrase-comprimés pour lancer l'écrasement.

Étape 2: baisser la poignée pour écraser les comprimés.

Étape 3: baisser la poignée pour déclencher le mouvement de broyage. Baisser la poignée plusieurs fois pour broyer les comprimés en poudre fine.

Étape 4: extraire le sachet.



BROYEUR À COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE

- **25850 BROYEUR À COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO**

Broyeur à comprimés professionnel et silencieux pour écraser rapidement et efficacement les médicaments dans les hôpitaux, les centres de soins et les organisations de soins à domicile. Évite l'exposition à poussière ou la contamination croisée. Fonctionne par cycles autonomes moyennant la combinaison de compression et rotation, qui permet de broyer plusieurs comprimés standard et revêtus à chaque cycle. Une fois introduit dans la spéciale coupelle de 30 ml, le médicament est transformé en poudre en 8 secondes seulement. Les comprimés pulvérisés sont idéaux pour les patients qui ont difficulté à avaler ou pour les médicaments à administrer par voie intraveineuse. Pourvu de tête de broyage en acier inox, 30 coupelles, 30 feuilles de cellophane, adaptateur CA/CC et mode d'emploi GB, FR, IT, PL, DE, NL disponibles sur www.gimaitaly.com.

MADE IN NETHERLANDS

COMPRIMÉ RÉDUIT EN POU-DRE EN QUELQUES SECONDES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Volume coupelle:	30 ml
Durée cycle de broyage:	8 secondes pour comprimés réguliers
Bruit:	52dB
Alimentation:	batterie rechargeable lithium-ion, 12 V 3 Ah
Autonomie batterie:	500 broyages (trois jours de fonctionnement continu)
Temps de recharge:	2 heures
Dimensions - poids:	80x70x217 mm - 1,5 kg

- **25851 COUPELLES MÉDICAMENTS SEVERO - boîte de 2100**
 - **25852 COUVERCLE COUPELLES SEVERO - boîte de 2000**
 - **25853 FEUILLE CELLOPHANE POUR BROYEUR SEVERO - boîte de 2100**
 - **25854 PLAQUE DE STABILITÉ MAGNÉTIQUE SEVERO**
- Plaque en métal revêtu par poudre et autocollant magnétique à insérer sur le fond pour stabiliser Severo sur les chariots de médicaments.




DISTRIBUTEUR DE COMPRIMÉS - SANS FIL

- **25871 DISTRIBUTEUR DE COMPRIMÉS SANS FIL**

Distributeur automatique de comprimés sans fil pour administrer et enregistrer les données relatives au dosage des comprimés par l'Appli Healbox et le serveur cloud. Permet aux patients et aux soignants de programmer les dosages jusqu'à un maximum de 28 jours consécutifs, de sorte que chaque patient puisse recevoir la dose exacte au juste moment. Jusqu'à 9 alarmes acoustiques ou visuelles par jour, demeurant actives pendant 30 minutes ou jusqu'à l'ouverture du distributeur. La rotation est automatique au moment de la dose successive. 28 compartiments peuvent contenir 24 comprimés ayant les dimensions de l'aspirine. Le couvercle peut être verrouillé avec la clé de métal. Conçu pour hôpitaux, centres de soins ou utilisation personnelle. Livré avec 1 plateau à médicaments, 1 série de bagues de dosage, 1 clé en métal, 4 batteries AA et mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compartiments:	28 logements	Plage de connexion:	champ limité 10 mètres
Capacité:	24 comprimés (Aspirine)	Alimentation:	4 batteries AA
Matériau:	ABS	Dimensions:	225x h 68 mm
Dim. écran LED:	60x30 mm	Poids:	600 g

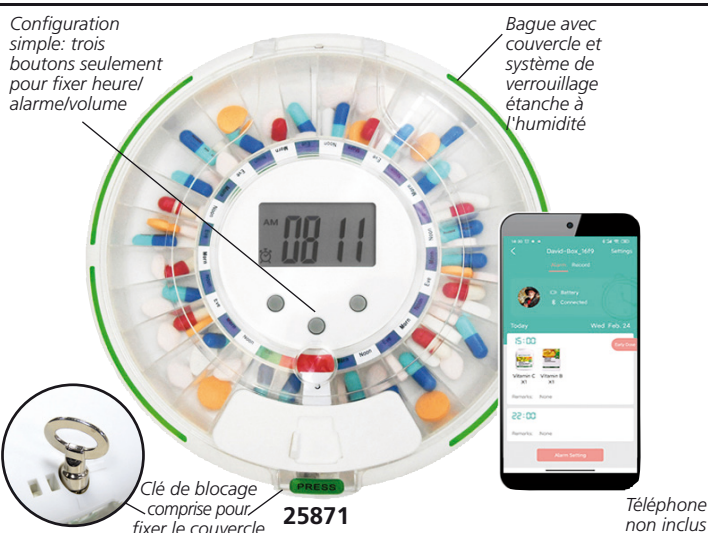

PINCES DE PRÉHENSION

- **28960 PINCE DE PRÉHENSION - 3 PRÉHENSIONS - 66 cm**
- En aluminium, poignée en PP. Trois possibilités de préhension: crochet en acier, pointe magnétique, tête en caoutchouc.

- **28963 PINCE DE PRÉHENSION - pliable**
- Portée étendue pour éviter la nécessité de se plier et grimper pour saisir les objets difficilement accessibles. Longueur: 80 cm, pliable en 2. Languette de blocage pour maintenir l'objet en place.