



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

غطاء بأربطة للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج غطاء بأربطة للاستخدام مرة واحدة

كود المنتج FGDCT-SM35

موديل المنتج أربطة على الغطاء، 62 x 14.5 سم

الهيكل والتكوين الغطاء مصنوع من 40gSMS-35، بشريط مرن للتثبيت.

الاستخدام المقصود تُستخدم المنتجات بشكل أساسي للزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة، يكون المنتج رطباً أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج

1. افتح عبوة المنتج، وأخرجه من الغطاء، واضغط على طرفي الغطاء بكلتا يديك.

2. ارفع يدك، وضع الغطاء على رأسك، واضبطه للتأكد من عدم تسريب شعرك. التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج يُستخدم لشخص واحد، ولا تشارك منتجك مع شخص آخر.

3. يُحظر الاستخدام عند تلف العبوة أو الأغشية.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

الصلاحية سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

REF	كود المنتج		يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		يحفظ في مكان بارد وجاف
LOT	رقم الدفعة		تاريخ التصنيع		تاريخ انتهاء الصلاحية
	الشركة المصنعة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	ليس معقم		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام
	جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745		هذا الجانب		الجهاز الطبي
	حد درجة الحرارة		معرّف فريد للجهاز		هشة ، والتعامل معها بحذر

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Humiss Beratung
GmbH Gneisenastraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM35

مستورد عن طريق / Εισαγωγή από
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

