



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SA - دليل الاستخدام للمعدات الغير جراحية التي يمكن إعادة استخدامها

هذه الأدوات مخصصة للاستخدام من قبل الممارسين الطبيين الذين تلقوا تدريبًا خاصًا على كيفية استخدامها والعناية بها. يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو الصيانة السيئة أو غير المناسبة إلى تدهور الأدوات بسرعة. يوصى بتنظيف الأدوات وتجفيفها في المرة الأولى وبعد كل استخدام. يجب تنظيف الأدوات دائمًا قبل التعقيم. للتنظيف الآلي، استخدم فقط المنظفات المعتمدة والمصدقة لغسل المعدات. للتنظيف اليدوي، استخدم المنظفات المعتمدة والمصدقة والفرشاة والماء الجاري. اتبع دائمًا التعليمات حول كيفية استخدام المنظف؛ نظف الأدوات عند فتحها وإغلاقها؛ اشطفها لمدة 3 دقائق وتحقق من دخول الماء وخروجه من الفتحات العمياء عدة مرات. استخدم الماء منزوع المعادن تمامًا في مرحلة الشطف النهائية. يمكن أن تتعرض الأدوات غير المجففة للتلف بسبب التآكل. جفف الأدوات دائمًا. تأكد أيضًا من عدم ملامسة المنتج للأحماض أو المطهرات العدوانية الأخرى التي قد تتسبب في تآكله. يجب التخلص من الأدوات التي تظهر عليها علامات التآكل على الفور. قم دائمًا بإجراء فحص بصري بحثًا عن أي تلف أو علامات تآكل: يجب أن تكون الحواف الحادة خالية من الخدوش وذات حواف متصلة؛ يجب ألا يكون هناك أي تشوه في الأدوات ذات الأجزاء الطويلة؛ يجب فحص الأدوات التي تعد جزءًا من مجموعة أكبر مع مكونات المجموعة الأخرى؛ تحقق دائمًا من الحركة الدورانية للمفصلات، والتي يجب ألا يكون بها حركة مفروطة؛ تحقق دائمًا من عمل أنظمة القفل. أثناء وجود الأدوات تحت الضمان، تكون إصلاحات و/أو استبدال جميع الأجزاء المعيبة، لأسباب مقبولة من قبل الشركة المصنعة، مجانية، باستثناء تكاليف العمالة والسفر والنقل والتعبئة وما إلى ذلك. لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم للمنتج

شروط ضمان جيمبا GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمبا GIMA لمدة 12 شهر.

تحذيرات

يجب الإبلاغ فورًا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

Simboli / Symbols / Symboles / Symbole / Simbolos / Símbolos / Σύμβολα /

	IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante DE Hersteller GR Παραγωγός	SA الشركة المصنعة
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico DE Herstellungsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής	SA تاريخ التصنيع
	IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril DE Nicht steril GR Όχι αποστειρωμένο	SA ليس معقم
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)	SA الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية
	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto DE Erzeugniscode GR Κωδικός προϊόντος	SA كود المنتج
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote DE Chargennummer GR Αριθμός παρτίδας	SA رقم الدفعة

	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso PT Consultar as instruções de uso DE Gebrauchsanweisung beachten GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SA اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία SA يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον SA يحفظ في مكان بارد وجاف
	IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario PT Dispositivo médico DE Medizinprodukt GR Ιατροτεχνολογικό προϊόν SA جهاز طبي
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745
	IT Identificatore univoco del dispositivo GB Unique device identifier FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único PT Identificador exclusivo do dispositivo DE Unique Device Identifier GR Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής SA معرف فريد للجهاز
	IT Rappresentante autorizzato nel Regno Unito GB Authorized Representative in the UK FR Représentant autorisé au Royaume-Uni ES Representante autorizado en el Reino Unido PT Representante autorizado no Reino Unido DE Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich GR Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο Η.Β. SA الممثل المعتمد في المملكة المتحدة
	IT Rappresentante autorizzato in Svizzera GB Authorized Representative in Swiss FR Représentant autorisé au Suisse ES Representante autorizado en Suizo PT Representante autorizado no Suíço DE Autorisierter Vertreter im Schweizer GR Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο Ελβετός SA الممثل المعتمد في سويسرا



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
 Made in Pakistan

