


GINRAM®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA
Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesi transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

**COD. 770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

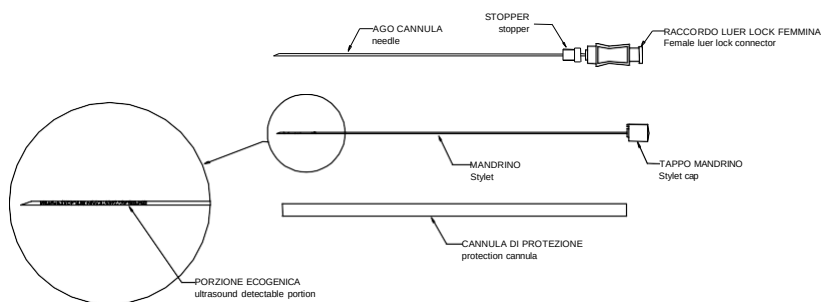

DK

Brugsanvisning

Vær sikker på, at mandrillen er lukket. Indfør nålen i en lodret akse for at følge ultralydssporet (tidligere identificeret) op til fostercisternen. Fjern mandrillen og påsæt en 20 cc sprøjte.

Aspirer væsken ved et langsomt og moderat tryk.

Genindsæt mandrillen og fjern både nål og mandril. Overfør fostervæsken til et tørt sterilt prøveglas og opbevar det ved 37° C.

Advarsel: Bør kun anvendes under streng medicinsk overvågning. Anvendes umiddelbart efter åbningen. Opbevares ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.

Kan indeholde spor af nikkel.

LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE