

LUXAMED®

LUXAMED® Reflexhammer

LUXAMED® Reflex hammer

Marteau reflex LUXAMED®

LUXAMED® Martello reflex

Martillo LUXAMED® Reflex

Młotek refleksyjny LUXAMED®

Martelo reflexos Luxamed®

Deutsch	2
English	8
Français	14
Italiano	20
Español	26
Polski	32
Portuguese	38

LUXAMED®



Hersteller: LUXAMED GmbH & Co. KG *

Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germany

Telefon: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0)7344 92905 10

E-Mail: info@luxamed.de * www.luxamed.de

- DEUTSCH -



Lesen Sie vor Benutzung des LUXAMED® Reflexhammers diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf.

LUXAMED® Reflexhammer

Die LUXAMED® Reflexhämmer werden ausschließlich als Untersuchungsinstrument zur Testung der Muskel- bzw. Sehnenreflexe und der Hautreflexe auf gesunder Haut verwendet. Am Hammerstiel befindet sich eine kleine Nadelspitze zur Untersuchung der Sensibilität der Haut. Diese Spitze ist vorsichtig anzuwenden, so dass keine Hautperforation oder Verletzungen entstehen.

Die Instrumente dürfen nur von medizinisch geschultem Personal verwendet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß, nur für den zugelassenen Einsatzzweck.

Kontraindikation:

keine

Warnhinweise:



Achten Sie vor jeder Anwendung darauf, dass die Gummiknöpfe am Hammerkopf ordentlich angebracht sind. NIE ohne Gummiköpfe verwenden.



Verwenden Sie die neurologische Tastspitze am Hammergriff nur so, dass es zu keiner Verletzung oder Perforation des Anwendungsgebiets kommt.



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendung:

Die Gummieinsätze der Reflexhämmer werden auf die Körperreflexzone geklopft, welche auf ihre Funktionalität geprüft werden sollen. Dabei ist auf eine vorsichtige Anwendung zu achten. Durch den ausgelösten Reflex kann eine Diagnose erstellt werden.

Durch leichtes Drücken oder sanftes hin- und her bewegen der Tastspitze am Hammergriff auf der Haut kann die Hautsensibilität geprüft werden.

Reinigung:

Reinigen Sie den Reflexhammer nach jeder Anwendung. Der Reflexhammer kann mit einem feuchten Tuch (z.B. leicht alkalische oder pH-neutrale Reinigungsmittel) abgewischt werden.

Desinfektion:

Zur Desinfektion bzw. desinfizierenden Reinigung der äußeren Oberflächen des Reflexhammers kann eine Wischdesinfektion angewendet werden. Hierzu kann Isopropanol verwendet werden.

Sterilisation:

Es ist keine Sterilisation nötig und zugelassen.

Entsorgung:

Das Produkt und dessen Zubehör kann dem Hausmüll zugeführt werden.

Lager-/Transportbedingungen und Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur zwischen -10° und +40°C.

Rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 90%.

Symbolerklärung

	Hersteller
	Herstelldatum
	Gebrauchsanweisung beachten
	Warnhinweise
	Konform mit EU Regularien
	Es handelt sich bei dem Gerät um ein Medizinprodukt
	Konform mit UK Regularien
	Schweizer Bevollmächtigter für Medizinprodukte: Inspira GmbH Thunstrasse 64 CH-3110 Münsingen

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Werksgarantie ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist durch Rechnung nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern kostenlos beseitigt. Durch die Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit auf das ganze Gerät ein, sondern nur auf die ausgewechselten Bauteile.

Von der Garantieleistung ausgenommen ist die Abnutzung durch Verschleiß, Transportschäden sowie alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung (z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung) entstanden sind oder auf Eingriffe von Unbefugten zurückzuführen sind. Durch die Garantie werden keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gemäß § 437 BGB werden nicht eingeschränkt.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantie ist das Gerät zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Hersteller zu senden:



LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Straße 3

89143 Blaubeuren

GERMANY

Tel.: + 49 (0) 7344 92905-0

