




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO EM AÇO - 7 PEÇAS

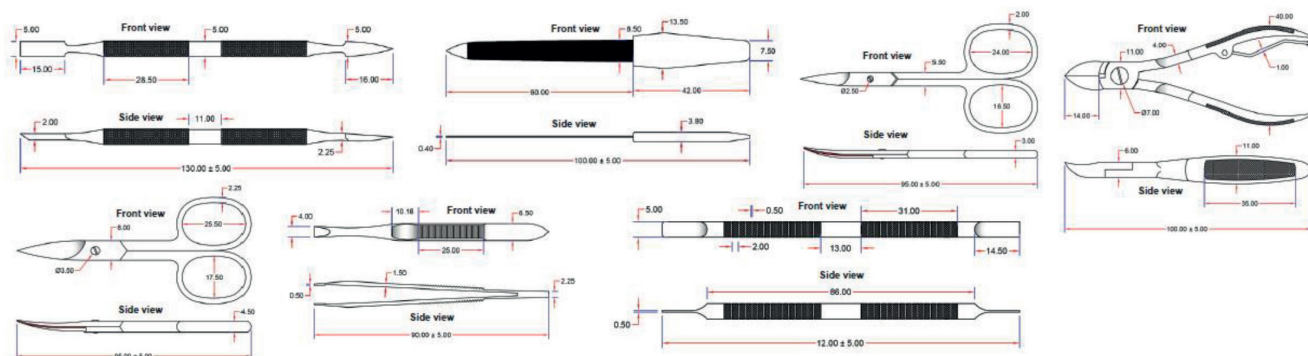

Instrumentenbeschreibung

Bezeichnung: Nagelhautschieber und Nagelreiniger, 13 cm

Bezeichnung: Nagelfeile mit weißem Plastikhandgriff, 10 cm

Bezeichnung: Nagelhautschere, 9,5 cm

Bezeichnung: Nagelknipser, 10 cm

Bezeichnung: Nagelschere 9,5 cm

Bezeichnung: Pinzette, 9 cm

Bezeichnung: Nagelhautschieber Zweiseitig, 12 cm

Hinweise zur Verwendung



- Außerhalb der Reichweite von unbefugten Personen aufbewahren.
- Das Instrument ist nur von ausgewiesenen Personen zu verwenden.
- Nur für den professionellen Einsatz - muss vor Gebrauch desinfiziert werden.

Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen, Einschränkungen und besondere Behandlung

Ordnungsgemäße Reinigungsmethoden

Eine ordnungsgemäße Reinigung erfordert Flüssigseife/Reinigungsmittel, Wasser und eine saubere und desinfizierte Scheuerbürste, um allen sichtbaren Schmutz und alle Rückstände zu entfernen. Alle Teile sollten mit einer sauberen und desinfizierten Scheuerbürste unter fließendem Wasser geschrubbt werden. Die Reinigung ist keine Desinfektion; die Desinfektion ist ein völlig eigenständiger Schritt. Verschiedene Teile sind auf unterschiedliche Weise zu reinigen. Dies hängt oft davon ab, aus welchem Material das Teil besteht und wie es verwendet wurde.

HINWEIS: bevor ein Teil desinfiziert werden kann, muss die Reinigung ordnungsgemäß durchgeführt worden sein. Vor dem Eintauchen in Desinfektionsmittel müssen alle Teile gründlich abgespült und mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch abgetrocknet worden sein.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

IT - Indice dei simboli GB - Symbol index FR - Index des symboles
ES - Índice de símbolos PT - índice de símbolo DE - Symbolindex

REF	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use PT Consulte as instruções de uso FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Non sterile GB Non-sterile PT Não estéril FR Pas stérile DE Nicht steril ES No estéril
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco
LOT	IT Numero di lotto GB Lot number PT Número de lote FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote

	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture PT Data de fabrico FR Date de fabrication DE Herstellungsdatum ES Fecha de fabricación
EC REP	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community PT Representante autorizado na União Europeia FR Représentant autorisé dans la Communauté DE - Autorisierter Vertreter in der EG europäischen ES Representante autorizado en la Comunidad Europea

GIMA 39805

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller:
Medistar Instruments Co., New Miana Pura East,
Ror as Road, Sialkot - Pakistan
Shams@medistarinst.com
Made in Pakistan

REF MI-78982

EC REP Lorcan & Fyon B.V.
Europalaan, 40, 3526KS Utrecht,
Netherlands

Importato da / Imported by / Importé par /
Importiert von / Importado por / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

