
TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI
2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS
2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES

GIMA 44020, 44021, 44024

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/
Hersteller:
Anji Sukar Furniture Co., Ltd.
Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji,
Zhejiang Province, China. P.C.: 313300
peter@zjruixiang.com

REF AT243

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/
importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1, 20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export


gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Made in China




SICHERHEITSHINWEISE

1. Der Tisch muss regelmäßig gewartet werden. Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und dass das Kabel nicht beschädigt oder ausgefranst ist. Sicherstellen, dass keine Risse in der Aluminiumstruktur vorhanden sind.
2. Die empfohlene Gewichtsgrenze darf nicht überschritten werden. Andernfalls könnte der Nutzer schwer verletzt werden. Maximale Betriebsbelastung von 180 kg gete-stet.
3. Das PU-Leder darf nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Diese könnten das Material aus PU-Leder beschädigen. Zum Reinigen warmes Seifenwasser verwenden und danach trocken wischen.
4. Bevor der Tisch benutzt wird, muss sichergestellt werden, dass alle 4 Füße das gleiche Niveau haben. Wenn die Füße unterschiedliche Niveaus haben, kann es dazu führen, dass der Tisch instabil wird, was wiederum zu Verletzungen führen kann.
5. Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Massagetisch zusammenbauen oder zerlegen.
6. Bei der Verwendung von scharfen Gegenständen ist Vorsicht geboten, da die Abdeckung durchsto-chen werden kann. Die Tischabdeckung von scharfen Gegenständen fern halten.

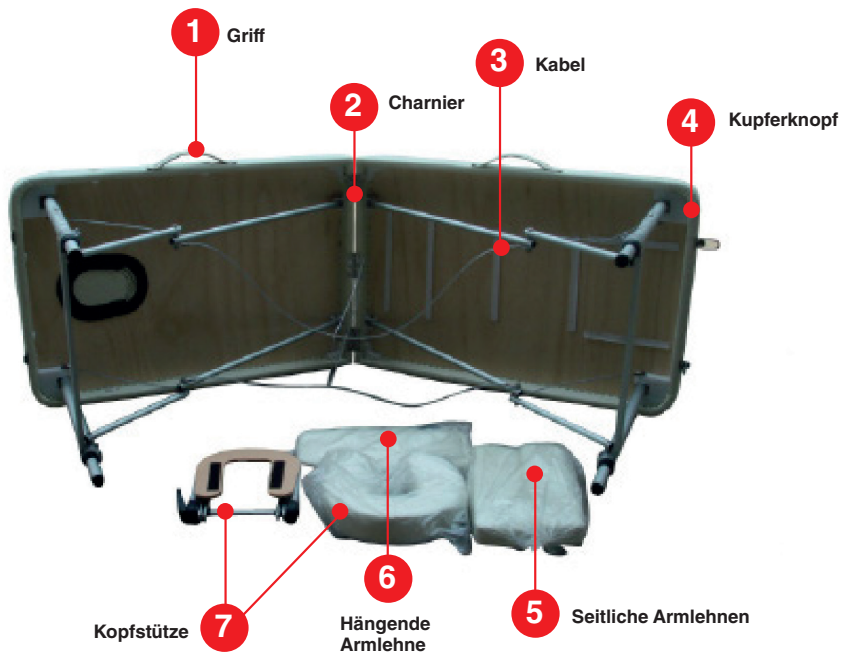

EINRICHTEN IHRES TISCHES

Gehen Sie folgendermaßen vor:

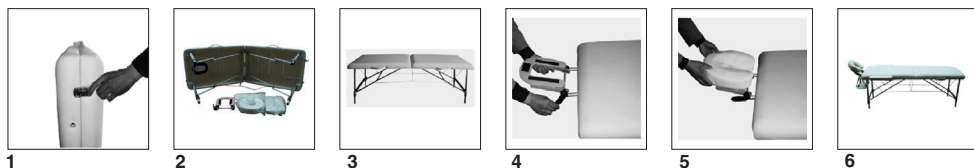

1. Den Verschluss öffnen.
2. Den Tisch auf die Seite mit den vier Gummifüßen am Boden legen, den Tisch so öffnen, dass alle vier Füße so weit wie möglich geöffnet sind.
3. Alle Zubehörteile heraus nehmen und den Tisch anheben bis alle vier Füße am Boden stehen.
4. Die Kopfstütze in die entsprechende Halterung legen und das Kopfstütz-Kissen in der Halterung befestigen
5. Die beiden seitlichen Armstützen in die beiden seitlichen Bohrungen einsetzen.
6. Nun ist der Tisch einsatzbereit.

Durch Drücken der Kupferknöpfe auf den Füßen kann die Tischhöhe eingestellt werden. Alle vier Füße können auf die gleiche Weise eingestellt werden. Sicherstellen, dass alle vier Füße in der gleichen Höhe eingestellt werden.

SCHLIESSEN UND TRANSPORT DES TISCHES

1. Das gesamte Zubehör abnehmen.
2. Den Tisch so auf den Boden legen, dass die beiden Gummifüße am Boden aufliegen.
3. Alle Zubehörteile unter das elastische Band unterhalb der Liegefläche legen.
4. Den Tisch zusammenfallen und den Verschluss schließen.
5. Den Massagetisch in die Tragtasche legen. Der Tisch kann dank des Griffs wie ein Koffer getragen werden.



Warnung: Wenn der Rahmen / die Füße / die Tischstruktur in irgendeiner Weise beschädigt sind, darf der Tisch nicht verwendet werden. Sollte der Tisch trotz Beschädigung verwendet werden, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Patienten führen. Es muss sofort repariert werden.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

