

ISTRUZIONI PER L'USO

BENDE ADESIVE STERILI

DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivo medico per medicazioni.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Lavare accuratamente le mani

Aprire la confezione e rimuovere la carta protettiva.

Centrare la compressa assorbente sulla ferita, evitando di toccarla, adattare la parte adesiva alla pelle pulita e asciutta.

Rinnovare la medicazione all'occorrenza..

In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

LATEX FREE:

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it

INSTRUCTIONS FOR USE

STERILE ADHESIVE PLASTERS

PURPOSE OF USE

Medical device for the administration of medicinal substances.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Wash your hands thoroughly

Open the package and remove the protective paper.

Center the absorbent compress on the wound, avoiding touching it, adapt the adhesive part to clean, dry skin.

Renew the dressing if necessary.

In case of reuse, infections may develop: consult a doctor.

LATEX FREE:

The device is latex free to prevent any risk of allergic reaction.

STERILIZATION METHOD:

Sterilized by Ethylene Oxide (EtO), residual amount of gas in accordance with the regulations.

DISPOSAL:

Disposal must be made in accordance with the applicable government regulations.

Incineration or landfill disposal must be carried out under controlled conditions.

The product that did not come in to contact with infectious agents or other hazardous materials, cannot be considered dangerous waste.

CONSERVATION:

Store in a cool dry place and far away from the any source of heat at a temperature.

These Instructions for Use note must be preserved by the user for the duration of the DM.



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it