



GIMA

cf. 5 pz
box 5 pcs



SUPER ULSTAR-2100HD (GIMA 72749)




000008

CARTA VIDEOSTAMPANTE DURICO compatibile Sony UPP-210HD
DURICO VIDEOPRINTER PAPER compatibile Sony UPP-210HD
PAPIER POUR IMPRIMANTE VIDÉO DURICO compatibile Sony UPP-210HD
PAPEL VIDEOIMPRESORA DURICO compatibile Sony UPP-210HD



Durico C&T, Inc. Oedap6-gil 33, Sangju-si, Gyeongbuk 37240,
Korea - Made in Korea - tel: +82 (0)2 525 8405

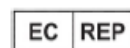

Durico Imaging BV, Villastraat 2 C, 1830 Machelen,
Belgium - tel: +32 470 632 965



30 °C
(86 °F)
5 °C
(41 °F)



DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE
DISPOSITIF MÉDICAL
PRODUCTO SANITARIO

Importatore / Importer / Importateur / Importador:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy



8

809178

550131



Rev.3-05/2025

Nota: immagazzinare la carta non stampata

- Conservare la carta non utilizzata in un luogo fresco (temperatura inferiore a 30°C), buio e asciutto.
- Evitare la luce solare diretta, umidità elevata e impronte digitali.
- Tenere il cloruro di vinile e tutti i solventi volatili lontano dalla carta.
- Durante il caricamento, estrarre i primi 15-20 cm di carta.

Inserimento della carta nella stampante

- Selezionare l'interruttore tipo di carta presente nella vs. stampante su tipo ad alta densità o tipo II.
- Rimuovere l'etichetta attaccata sulla parte superiore del rotolo di carta.
- Caricare la carta nella stampante e estrarre i primi 15-20 cm di carta.

- Non piegare la carta, non toccare la carta con le dita.

Conservazione della carta stampata

- Conservare la carta in un luogo buio, fresco e asciutto per evitare uno sbiadimento graduale.
- Non mettere solventi organici volatili, come alcool, sulla superficie della carta stampata.

- Non applicare sulla carta nastri di plastica, non utilizzare gomme di plastica, vinile e plastificanti.

Prestare attenzione a non lasciare impronte digitali sulla carta.

- Non strofinare la superficie stampata.
- Conservare ciascun foglio stampato rivolto verso l'alto o conservare con un foglio di carta tra i fogli.

SCATOLA
BOX



RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

SACCHETTO
BAG



RACCOLTA INDIFFERENZIATA
MIXED WASTE COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Rev.2-05/2025