



GIMA

cf. 10 pz
box 10 pcs



SUPER ULSTAR-840S (GIMA 72752)

LOT 000009




CARTA VIDEOSTAMPANTE DURICO compatibile Sony UPP-84S
DURICO VIDEOPRINTER PAPER compatibile Sony UPP-84S
PAPIER POUR IMPRIMANTE VIDÉO DURICO compatible Sony UPP-84S
PAPEL VIDEOIMPRESORA DURICO compatible Sony UPP-84S



Durico C&T, Inc. Oedap6-gil 33, Sangju-si, Gyeongbuk 37240,
Korea - Made in Korea - tel: +82 (0)2 525 8405

30 °C
(86 °F)
5 °C
(41 °F)

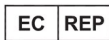

Durico Imaging BV, Villastraat 2 C, 1830 Machelen,
Belgium - tel: +32 470 632 965



DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE
DISPOSITIF MÉDICAL
PRODUCTO SANITARIO

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:
GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com



Rev.4-03/2026

Nota: immagazzinare la carta non stampata

- Conservare la carta non utilizzata in un luogo fresco (temperatura inferiore a 30°C), buio e asciutto.
- Evitare la luce solare diretta, umidità elevata e impronte digitali.
- Tenere il cloruro di vinile e tutti i solventi volatili lontano dalla carta.
- Durante il caricamento, estrarre i primi 15-20 cm di carta.

Inserimento della carta nella stampante

- Selezionare l'interruttore tipo di carta presente nella vs. stampante su tipo standard o tipo I.
- Rimuovere l'etichetta attaccata sulla parte superiore del rotolo di carta.
- Caricare la carta nella stampante e estrarre i primi 15-20 cm di carta.

- Non piegare la carta, non toccare la carta con le dita.

Conservazione della carta stampata

- Conservare la carta in un luogo buio, fresco e asciutto per evitare uno sbiadimento graduale.
- Non mettere solventi organici volatili, come alcool, sulla superficie della carta stampata.

- Non applicare sulla carta nastri di plastica, non utilizzare gomme di plastica, vinile e plastificanti.

Prestare attenzione a non lasciare impronte digitali sulla carta.

- Non strofinare la superficie stampata.
- Conservare ciascun foglio stampato rivolto verso l'alto o conservare con un foglio di carta tra i fogli.

SCATOLA BOX	 PAP	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SACCHETTO BAG	 C/LDPE	RACCOLTA INDIFFERENZIATA MIXED WASTE COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal		

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.