

Art. CS-270-D CORE-SCRUB DRY Spazzola/spugna per il lavaggio chirurgico delle mani

Codice Articolo	CS-270-D
Misura	====
N°. Repertorio	N.A. IN QUANTO NO D.M.
Codice CND	N.A. IN QUANTO NO D.M.

Descrizione

Spazzola e spugna a secco, monouso, sterile, per il lavaggio delle mani del personale ospedaliero. Non contiene soluzioni saponose e/o antisettiche.

Impiego

Dispositivo costituito da spazzola, spugna e pulisci unghie destinato al lavaggio chirurgico di mani, unghie ed avambracci dell'equipe chirurgica. Esclusivamente per uso esterno pre-operatorio.

Controindicazioni

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se necessario, consultare il medico.



NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.

Target

Sale operatorie, reparti di degenza, rianimazioni, pronto soccorso, ambulatori.


Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

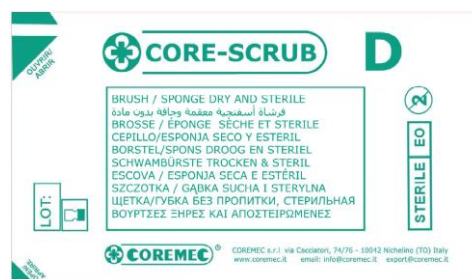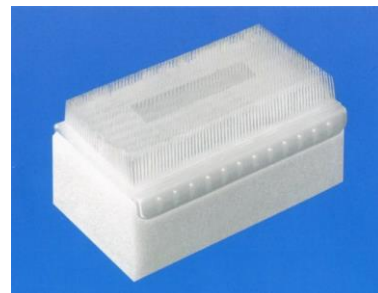

Caratteristiche Tecniche

Materiale Impiegato	SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata SPUGNA in poliuretano PULISCI UNGHIE in pvc
Confezionamento	Singolo pezzo in involucro termosaldato
Dimensione spazzola	Lunghezza mm 78 Larghezza mm 46 Altezza mm 8 - 12
Dimensione spugna	Lunghezza mm 78 Larghezza mm 46 Altezza mm 24
Dimensione pulisci unghie	Lunghezza mm 52 Larghezza mm 10
Unità di vendita	9 box dispenser da 30 pz
Scadenza	Prodotto sterilizzato - Validità 5 anni

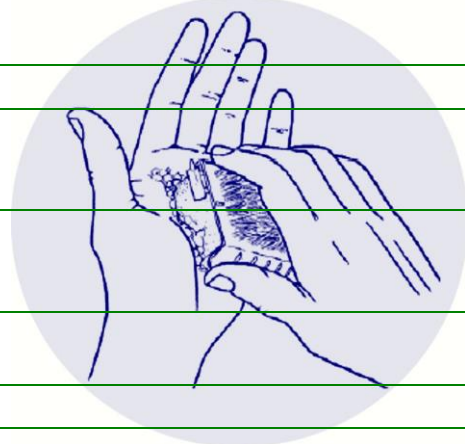

Modo d'uso

- Aprire la confezione dal lato "APRIRE".
- Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie cutanea umida.
- Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti e le unghie circa 1 minuto.
- Risciacquare abbondantemente mani e avambracci con acqua corrente.
- Gettare la spazzola dopo l'uso e smaltire secondo le disposizioni legislative in vigore.

LATEX FREE

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
 C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
 Tel. +39 011.35.89.481 - Fax +39 011.35.89.483
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.

Export Department
 e-mail: export@coremec.it